

# Afvoerend materiaal

## Catheters en inbrengsets

### FeelGood Siliconen Catheter

De twee-wegse FeelGood siliconen catheter wordt via de plasbuis in de blaas gebracht en kan enkele weken blijven zitten. De 40 cm catheter is latex-vrij, volledig steriel en heeft röntgen contrast strepen.

De diameter van catheters wordt aangeduid met de Franse maat CH, wat staat voor charrière. De waarde van één CH is 1/3 mm.



Naam	Artikelnummer	Z-index	Inhoud
FeelGood Siliconen Verblijfcatheter CH12	82012	15717658	1 st.
FeelGood Siliconen Verblijfcatheter	82014	15641716	1 st.
FeelGood Siliconen Verblijfcatheter	82016	15641724	1 st.
FeelGood Siliconen Verblijfcatheter	82018	15651732	1 st.

### Inbrengset - BioCare Cathether Inbrengset

De BioCare Cathether Inbrengset geeft u alle benodigheden voor het inbrengen van een blaascatheter. De inbrengset bevat:

- 1 plastic bakje, twee delen, hoogteverschil
- vier gaasballetjes
- vier verwisselbare gaasjes (7,5x7,5) 8 velletjes
- 1 pincet
- 1 lege injectienaald (10ml)
- 1 injectienaald (10 ml) met steriel water gemixed met 10% glycerine
- 1 afdeksel met opening (60x60cm)
- 2 latex handschoenen, groot, zonder poeder.




Naam	Artikelnummer	Z-index	Inhoud
BioCare Catheter Inbrengset Steriel Compleet	BC92300	15830667	1 st.

## Intermitterend catheter

Gecoate siliconencatheter om urine uit de blaas af te tappen. De hydrofiele laag moet eerst worden geactiveerd met water om weerstand tijdens het inbrengen te voorkomen. Geschikt voor vrouwen en eenmalig gebruik.

Werkwijze:

1. Voor gebruik 30 sec onder water houden
2. Katheter inbrengen
3. Urine loopt uit de blaas
4. Katheter verwijderen

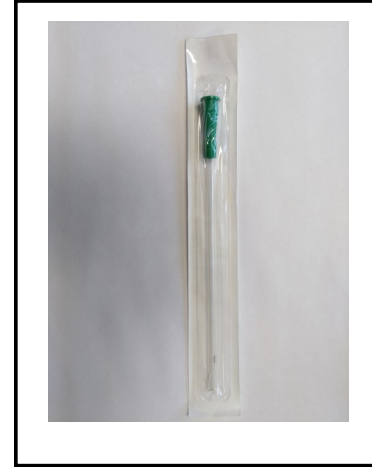

Naam	Artikelnummer	Z-index	Inhoud
FeelGood Intermitterend Katheter CHI4 - 18cm slang	8001418	16254201	1 st.
FeelGood Intermitterend Katheter CHI6 - 18cm slang	8001618	1624171	1 st.

# Urinebeenzakken

## FeelGood Urinebeenzakken & Urinenachtzak

Urinezakken voor meerdaags gebruik zijn ontwikkeld om infectiegevaar bij cathetergebruikers te verminderen. Elke keer dat de verbinding tussen de catheter en de zak wordt verbroken is immers een kans op infectie! Meerdaagse urinezakken zijn voorzien van een aftapkraantje, waardoor ze makkelijk kunnen worden geleegd of doorgekoppeld aan een nacht-opvangzak.

De meerdaagse urinezakken zijn er in twee varianten: de beenzakken voor overdag, met een inhoud variërend van 500ml tot 750ml en de bedzakken voor 's nachts met een inhoud van 2000ml.

De FeelGood urinenachtzak koppelt u aan de FeelGood urinebeenzak. Hierdoor hoeft u 's nachts uw bed niet uit om de beenzak te legen, en kunt u langer profiteren van een gesloten systeem.

Naam	Artikelnummer	Z-index	Inhoud
FeelGood Urinebeenzak 500 ml - 10cm slang	900-500-10	16077504	10 st.
FeelGood Urinebeenzak 500 ml - 50cm slang	900-500-50	16066512	10 st.
FeelGood Urinebeenzak 500 ml - 50cm slang Knipbaar	900-500-50-LC	16183061	10 st.
FeelGood Urinebeenzak 750 ml - 50cm slang Knipbaar	900-750-50-LC	16183088	10 st.
FeelGood Urinenachtzak 2000ml - 130cm slang	920-2000-130	16077520	10 st.

